


AVANT l'utilisation

Lisez attentivement l'intégralité de ces instructions ainsi que la notice du médicament, se trouvant à l'intérieur de la boîte.

- 1 **Sortez le stylo prérempli du réfrigérateur 30 minutes avant l'injection.**

Ne pas remettre le stylo prérempli au réfrigérateur lorsqu'il a atteint la température ambiante.

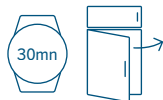

- 2 **En amont de l'injection :** Regardez l'aspect du médicament par la fenêtre du stylo prérempli : il doit être clair et incolore à légèrement jaune.



Stylos préremplis SureClick® Amgevita® 40 mg/0,4 mL et 80 mg/0,8 mL

- 3 **Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.**



- 4 **Rassemblez tout le matériel nécessaire pour pratiquer l'injection.** Vous aurez également besoin de matériel supplémentaire non inclus dans le carton : lingettes alcoolisées, coton ou gaze, pansement, conteneur à déchets tranchants (Boîte DASRI*, disponible gratuitement dans les pharmacies sur présentation de votre ordonnance, vous permettant d'éliminer votre stylo injecteur).



Comment utiliser les boîtes à aiguilles ?

- Rangez les boîtes à aiguilles hors de portée des enfants.
- Ne pas remplir la boîte à aiguilles au-delà du trait supérieur.
- Lorsque la boîte est pleine, vous devez la fermer définitivement.
- Le délai de stockage de la boîte à aiguilles ne doit pas dépasser 3 mois.




* DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux, incluant les aiguilles et tout matériel piquant, coupant ou perforant potentiellement contaminé par des agents biologiques pathogènes représentant alors un risque d'infection.

- 5 **Choisissez un site d'injection** parmi les plus appropriés.

Réalisez l'injection dans votre cuisse ou votre ventre (au delà de 5 centimètres autour du nombril).

Pincez la peau pour créer une surface ferme au site d'injection. Maintenez la peau pincée jusqu'à ce que l'injection soit terminée.

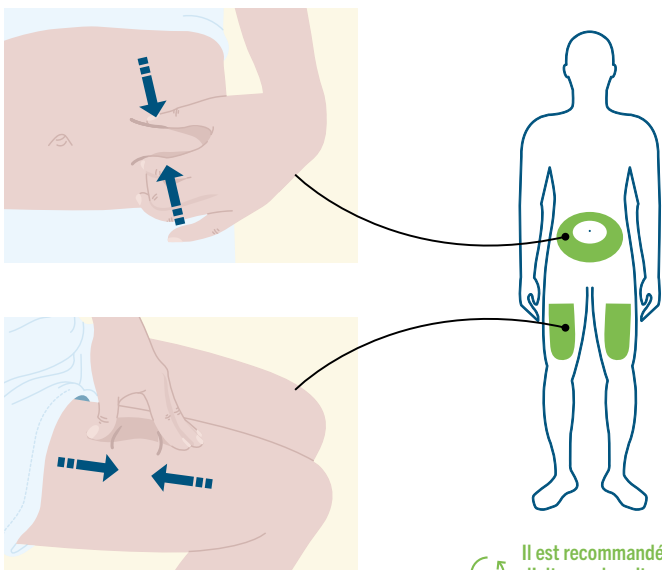


Évitez les zones comportant des cicatrices ou des vergetures et les zones où la peau est sensible ou présente une ecchymose, une rougeur ou une induration.

- 6 **Nettoyez la zone d'injection** à l'aide d'une lingette alcoolisée.

Laissez **sécher** votre peau.

Ne plus toucher cette zone avant d'effectuer l'injection.

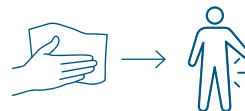

PENDANT l'utilisation


- 7 **Décapuchonnez le stylo prérempli :**
- Tenez le stylo prérempli de sorte que vous puissiez voir la fenêtre.
 - Tirez le capuchon jaune d'un seul coup.
 - Pincez la peau pour créer une surface ferme au site d'injection.

Ne retirez le capuchon jaune que lorsque vous êtes prêt(e) à procéder à l'injection (dans les 5 minutes).

Ne jamais remettre le capuchon de l'aiguille. Cela pourrait endommager l'aiguille.




- 8 **Déverrouillez le stylo prérempli :**

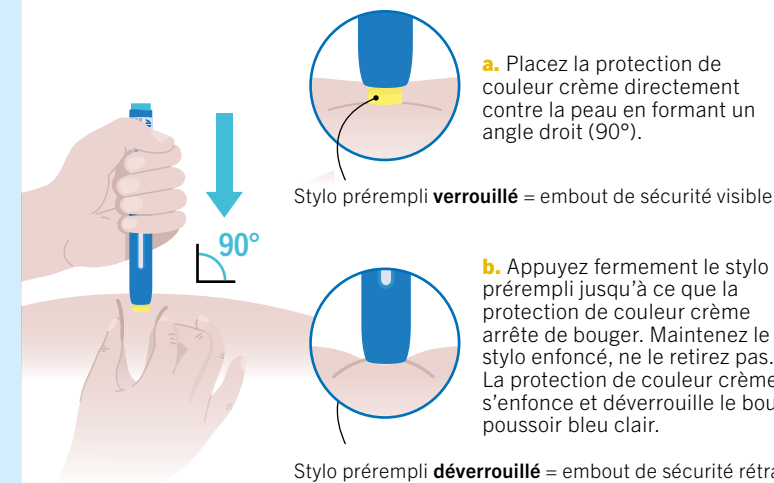

9


Lorsque vous êtes prêt à **procéder à l'injection**, appuyez sur le bouton bleu clair. Vous pouvez entendre ou sentir un clic.

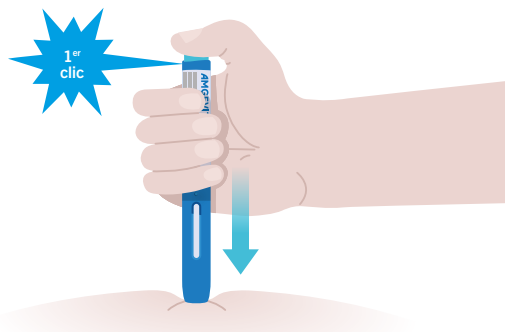


10

Maintenez le stylo enfoncé. Lorsque la fenêtre est entièrement jaune, l'injection est terminée.

- L'injection peut prendre jusqu'à 10 secondes.
- Vous pouvez entendre ou sentir un clic.
- Retirez le stylo prérempli de votre peau.

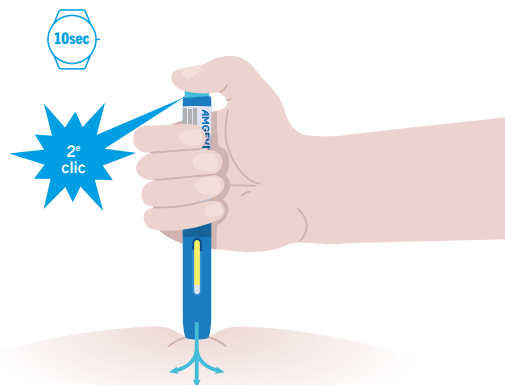

Remarque : lorsque vous retirez le stylo prérempli de votre peau, la protection de couleur crème se verrouille autour de l'aiguille.

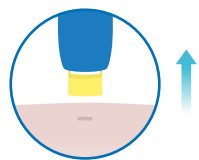

Important : Lorsque vous retirez le stylo prérempli, si la fenêtre n'est pas devenue jaune, ou si vous avez l'impression que le médicament continue de sortir, ceci signifie que vous n'avez pas reçu la dose complète. Appelez votre médecin ou professionnel de santé immédiatement.

APRÈS l'utilisation

11

Vous réalisez vous-même vos injections, attention : vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets !

En effet, certains de vos déchets présentent un risque pour vous-même et pour toute autre personne susceptible d'entrer en contact avec.

Dans le cadre de votre traitement en auto-injection, vous devez vous munir de boîtes à aiguilles (ou collecteurs) pour vous aider à éliminer comme il se doit les seringues et aiguilles usagées.

Vous devez récupérer une boîte DASRI² (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux) dans une pharmacie. Il s'agit de votre conteneur à déchets tranchants.

Après utilisation, il faut placer le stylo prérempli dans la boîte DASRI².

Une fois la boîte pleine, vous devez fermer la boîte et la ramener dans le point de collecte le plus proche. Pour connaître les points de collecte près de chez vous, renseignez-vous auprès de votre pharmacien/médecin, de votre mairie ou sur le site internet www.dasri.fr/nous-collectons



- Ne pas réutiliser le stylo prérempli.

- Ne pas recycler le stylo prérempli ou le conteneur à déchets tranchants (DASRI) et ne pas les jeter avec les ordures ménagères. Seuls les cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures peuvent être jetées à la poubelle.

Important : Toujours garder le conteneur à déchets tranchants hors de la vue et de la portée des enfants.

Après une formation correcte à la technique d'injection, les patients peuvent s'auto-injecter Amgevita[®], si leur médecin l'estime possible, sous le couvert d'un suivi médical approprié.

Votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien vous indiquera alors comment effectuer vous-même l'injection. Il est important de ne pas pratiquer vous-même l'injection si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris le mode d'emploi.

❓ Pour toute question complémentaire, veuillez contacter le service d'information médicale Amgen au 0969 363 363.

Pour plus d'information, veuillez consulter la notice dans la boîte de votre médicament ou sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable ou en cas d'erreur médicamenteuse, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé : <https://signalement.social-sante.gouv.fr>

RÉFÉRENCES : 1. Notices Amgevita 40 mg/mL et 80 mg/mL solution injectable en stylos préremplis.
2. DASRI. 2020. <https://www.dasri.fr>. Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes. DASRI Définition. 2018. <https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/dasri-definition>. Consulté le 04 novembre 2024.
Document de Bon Usage élaboré par AMGEN - FRA-501-0225-80005 Février 2025.

Imprimé par HH France SAS - 25 rue Anatole France - 92300 Levallois Perret • AMGEN SAS société par actions simplifiée au capital de 307.500 euros - 377 998 679 RCS Nanterre - 25 Quai du Président Paul Doumer, 92400 Courbevoie



Les étapes d'injection des stylos préremplis SureClick[®] Amgevita[®] 40 mg/0,4 mL et 80 mg/0,8 mL

Votre médecin vous a prescrit Amgevita[®] dans le cadre de la prise en charge de votre maladie. Les instructions suivantes vous expliquent comment utiliser simplement votre stylo SureClick[®] Amgevita[®] 40 mg ou 80 mg à usage unique.¹

Ces fiches de bon usage Amgevita[®] vous sont remises par votre professionnel de santé.



AMGEN